


HUR iBalance



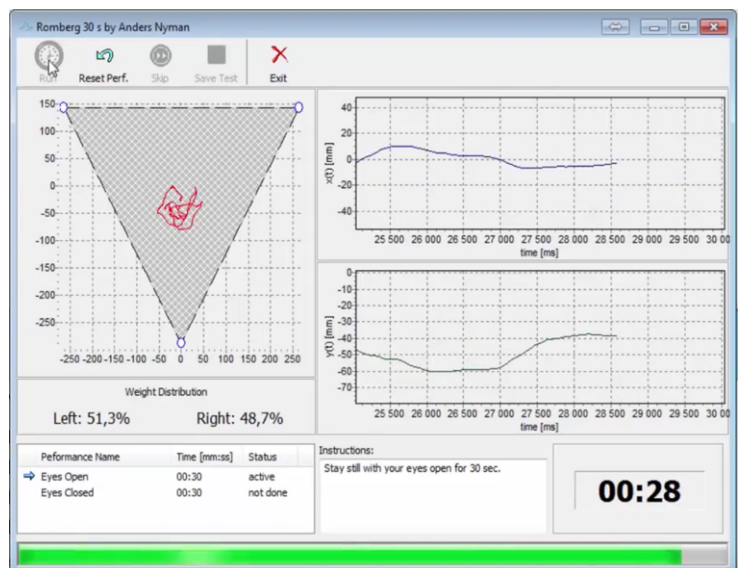

Høgskulen på Vestlandet

Innholdsfortegnelse

Hva er dette?	
Hvordan virker det?.....	
Service og vedlikehold	
iBalance Premium Manual	

10.05.2017

Lars Peder Bovim

Hva er dette?

HUR iBalance på Rehabiliteringslaben F327 er en balanseplattform med innebygget spill og tilhørende test- og analyseprogram iBalance Premium. Systemet kan brukes til balansetrening ved bruk av spill og til testing ved bruk av iBalance Premium. Se også på Kistler og Musclelab for å se hva som passer best til ditt prosjekt.

Vanskelighetsgrad



HUR iBalance er svært enkel i bruk og egner seg godt for både bachelor, master, PhD og annet. Analyseprogrammet iBalance Premium krever kun grunnleggende datakunnskaper.

Tilgjengelighet

Superbruker; Lars Peder Bovim, lpb@hvl.no

HUR iBalance er stasjonert på F327, men plattform og test- og analyseprogram er lett transportabelt. Ta kontakt med superbruker for utprøving og eventuelle spørsmål.

Filformat

Data fra iBalance Premium kan eksporteres til .xls (ExCel), .xls (SPSS) og .txt. Grafer og tabeller kan eksporteres til .jpg.

Hvordan virker det?

Dette er en grunnleggende beskrivelse av hvordan benytte HUR iBalance til trening og hvordan samle inn data i iBalance Premium på Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen. For inngående detaljer rundt innsamling og analyse av data henvises det til vedliggende manualer.

HUR iBalance spill

- *Påse at kabel fra plattform er koblet til skjerm foran plattform.*
- *Slå på skjerm foran plattform vha bryter på baksiden.*
- *Vent til maskinen har slått seg på. Dette tar 45-60 sek.*
- *Velg ønsket spill og følg instruksjoner*

Testing med HUR iBalance Premium

I HUR iBalance Premium kan du velge blant mange balansetester, som f.eks. Romberg, Limits of Stability, Squat o.l.

- *Du trenger programmet iBalance Premium installert på en bærbar PC.*
- *Påse at kabel fra plattform er koblet til bærbar PC.*
- *Åpne programmet iBalance Premium*
- *Velg aktuelt prosjekt eller lag nytt prosjekt under Add Group.*
- *Legg til person under Add Person.*
- *Velg test under Test eller lag en protokoll under Protocol.*
- *Følg instrukser på skjermen.*

Service/Vedlikehold

HUR iBalance er levert av HUR Helse, jp@hur.no/22 60 41 52. HUR iBalance inngår ikke i noen serviceavtale pr nå.

Bruksanvisninger

iBalance Premium Manual er å finne i skuff på F327 eller ved å scanne utstyrets QR-kode.