

Treax Pads



INNOVAID®
INTERACTIVE REHABILITATION SOLUTIONS



Høgskulen på Vestlandet

Innholdsfortegnelse

Hva er dette?	
Hvordan virker det?	
Service og vedlikehold	
Treax Pads Quickguide	
Treax Pads brukermanual norsk	
Treax Pads inngående brukermanual dansk	

16.05.2017

Lars Peder Bovim

Hva er dette?

Treax Pads brukes hovedsakelig til koordinasjon- og balansetrening. Ved hjelp av justerbare trykksensorer reagerer Treax Pads på trykk og responderer avhengig av funksjon du har den i; Random, Kraftskala, Balansefunksjon eller Reaksjonsøvelse. En pakke består av to grønne, to lilla og to oransje Pads. Se også HUR Balanseplattform om det kan være bedre egnet for ditt formål.

Vanskelighetsgrad



Treax Pads er svært enkle i bruk og har en medfølgende brukermanual med gode bildeforklaringer.

Egner seg godt for undervisning, men også som behandlingstiltak eller test i eventuelle prosjekter.

Tilgjengelighet

Superbruker EFR; Lars Peder Bovim

EFR har seks pakker a 6 pads. Disse er stasjonert på F327. Ta kontakt med superbruker for utprøving og eventuelle spørsmål.

Hvordan virker det?

Dette er en grunnleggende beskrivelse av hvordan benytte Treax Pads på Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen. For inngående detaljer henvises det til vedliggende manualer *Treax Pads by INNOVAID* og *Brugermanual*.

Treax Pads har fire funksjoner; Kraftskala, Balansefunksjon, Random og Reaksjonsøvelse.

Kraftskala

- Trykk raskt på «fot» eller «hånd».
- Juster sensitivitet med +/- . Se Treax Pads Quickguide for skala.

Balansefunksjon

- Hold inne «fot» i 2-3 sekund.
- Stå på Pad. Denne viser nå vektfordelingen frem/bak. Kan benyttes stående på begge ben (to Pads) eller på en fot (en Pad).

Random

- Trykk raskt på «Random» på alle Pads som skal brukes.
- Plasser i ønsket mønster. NB: Må ha minst en av hver farge, kan ha alle 30.
- Nå du trækker/berører en Pad lyser en farge. Trakk/ta hånden videre til aktuell farge. Her kan det lages løyper og konkurranser. Fri fantasi.

Reaksjonsøvelse

- Hold inne «Random» i 2-3 sekund på alle Pads som skal brukes.
- Plasser i ønsket mønster.
- Med ujevne øyeblikk vil en eller flere Pads lyse. Da gjelder det å berøre aktuelle Pads før lyset slukker.
- Lengden den lyser kan justeres med +/-.
- NB: Reaksjonsøvelse er kun beskrevet i vedlegget *Brugermanual*.

Service/Vedlikehold

Treax Pads er levert av INNOVAID, epost@iaid.no/66 98 00 00. Treax Pads inngår ikke i noen serviceavtale pr nå.

Bruksanvisninger

Treax Pads Quickguide, *Treax Pads brukermanual norsk* og *Treax Pads inngående brukermanual dansk* er å finne i skuff på F327, i hver Treax-pakke eller ved å scanne utstyrets QR-kode.