

# Rodby-tredemølle med skjermer



*Rodby*

IN THE LONG RUN



## Innholdsfortegnelse

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Hva er dette?</b> .....          |  |
| <b>Hvordan virker det?</b> .....    |  |
| <b>Service og vedlikehold</b> ..... |  |

29.03.2017

Lars Peder Bovim

### Hva er dette?

Rodby RL2500Ex1000 (Rodby-møllen) er en tredemølle med ekstra bredde og høy hastighet. Dette gir mulighet for trening og testing på sykkel, ski (staking) og med rullestol, i tillegg til gange/løping. Det er montert sikkerhetsline i taket slik at det ved behov kan nyttes sele. I tillegg har vi tre skjermer foran møllen som kan brukes i prosjekter hvor det er ønskelig med input i form av informasjon, distraksjon, underholdning og lignende. Pr dags dato har vi film fra Bergen som kan brukes ved gangtrening.

### Vanskelighetsgrad



Rodby-møllen er like enkel i bruk som andre tredemøller.  
Bruk av skjermene krever generell datakompetanse.

### Tilgjengelighet

Superbruker; Lars Peder Bovim, [lpb@hvl.no](mailto:lpb@hvl.no)

Rodby-møllen er plassert på F327. Gjennom Idrett har vi tilgang til en Rodby RL3500E som er 2,5m bred. Denne har kun en skjerm. Ta kontakt med superbruker for utprøving og eventuelle spørsmål.

### **Hvordan virker det?**

Dette er en grunnleggende beskrivelse av hvordan bruke Rodby-møllen og koble PC til skjermene på Høgskolen på Vestlandet, Campus Bergen. For inngående detaljer rundt innsamling og analyse av data henvises det til superbruker.

#### Rodby-møllen

- Slå på møllen med fysisk bryter under til høyre. Påse også at nødstopp på kontrollpanelet ikke er aktivert (Trekke den opp).
- Trykk «Start» på kontrollpanelet for manuell modus eller velg ønsket program på venstre side på kontrollpanelet.
  - o Trykk «Clear» etterfulgt av «Prog» om du ønsker å lage en egen protokoll for treningsøkten. Følg videre anvisninger på skjermen.
  - o Vi har mulighet for å lage protokoller på PC og koble til Rodby-møllen. Ta kontakt med superbruker for mer informasjon om dette.
- Rodby-møllen kan styres via Vintus-oppsettet om ønskelig. Les tilsvarende brosjyre om Vintus-oppsettet og ta kontakt med superbruker ved interesse.

#### Skjermene

Tre Sony-skjermer (40 tommer, 1920x1080) er satt opp rundt Rodby-møllen. Disse kan kobles til lab-PC eller egen PC med **tre** HDMI-, VGA-, Lightning- e.l.-tilganger.

- Alle skjermene kobles til PC-en med tilgjengelige koblinger.
- Slå på alle skjermene med samme fjernkontroll.
- Fokuser fjernkontrollen mot en og en skjerm og trykk på knappen øverst til venstre til du kommer til en aktiv kobling (Den inngangen du har koblet i på baksiden av aktuelle skjerm).
- Dersom skjermene er i feil rekkefølge; gå til «Kontrollpanel - Utseende og personalisering – Koble til en ekstern skjerm» og sorter. Trykk «Bruk» og bekreft eventuelle endringer.

### **Service/Vedlikehold**

Rodby RL2500 er levert av Rodby, [www.rodby.com/kontakt](http://www.rodby.com/kontakt). Rodby-møllen inngår ikke i noen serviceavtale pr nå. Skjermene er sammensatt internt og har ingen serviceavtale.